

HEINE OMEGA 600

Das Wichtigste in Kürze

Wir sagen Danke, dass Sie sich für das neue HEINE OMEGA 600 entschieden haben und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit Ihrem neuen Instrument.

Wenn Sie Ihre Erfahrungen oder Entdeckungen mit uns teilen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen: #heine #iuseheine #OMEGA600



**USB-C-
Anschluss**
Aufladen mit
USB-C Kabel

**Ladestands-
anzeige**

● ● ● ●
66–100 %

● ● ● ●
33–66 %

● ● ● ●
10–33 %

● ● ● ●
< 10 %

Helligkeitsregler

An/Aus, stufenlose Helligkeit von 3–100 %, und visionBOOST von 100–245 % für eine bis zu 20 % bessere Sicht auf die Netzhaut bei Medientrübungen. Für Rechts und Linkshänder positionierbar.

Filterhebel



Rotfrei-, Gelb-
und Blaufilter



Das Video „Einstellung des OMEGA 600“ erklärt Schritt für Schritt, wie Sie das Instrument an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

HEINE OMEGA 600

Das Wichtigste in Kürze



Flip-Up Funktion der Optikeinheit
Zur Interaktion mit dem Patienten



Okulare mit Klickverschluss
Um Ihre Sicht zu optimieren, können Sie die montierten Linsen mit +2D gegen die mitgelieferten neutralen Linsen 0D austauschen



Kopfband Weiteneinstellung



Mitbeobachter-Spiegel TM1



Staubschutzkappe für Frontscheibe

